

说明书

船型电机 TW61



版本

2024.07_V1.0



本公司可能进行技术更改以改善产品，恕不另行通知！

重要信息

- 床架轴线之间的距离必须为 581 毫米。
- 船型电机的工作周期为 10%，即最大连续运行时间为 2 分钟，休息时间至少为 18 分钟。
- 如果电源线损坏，则必须由制造商，其服务代理商或具有类似资格的人员进行更换，以避免危险。
- 在卸下保护盖之前请先断开主电源线，并且请勿拆解船型电机的内部零件。
- 船型电机设计用于室内运行，必须远离潮湿的环境。
- 最终用户因安装或拆卸操作而造成的任何损坏会导致保修的拒绝，我司不承担制造商的任何责任。
- 本设备不适合身体，感官或心理功能较弱的人(包括儿童)使用，除非负责其安全的人员监督或指导其使用本设备。
- 安装工作必须由合格的人员执行。

安装

● 总览

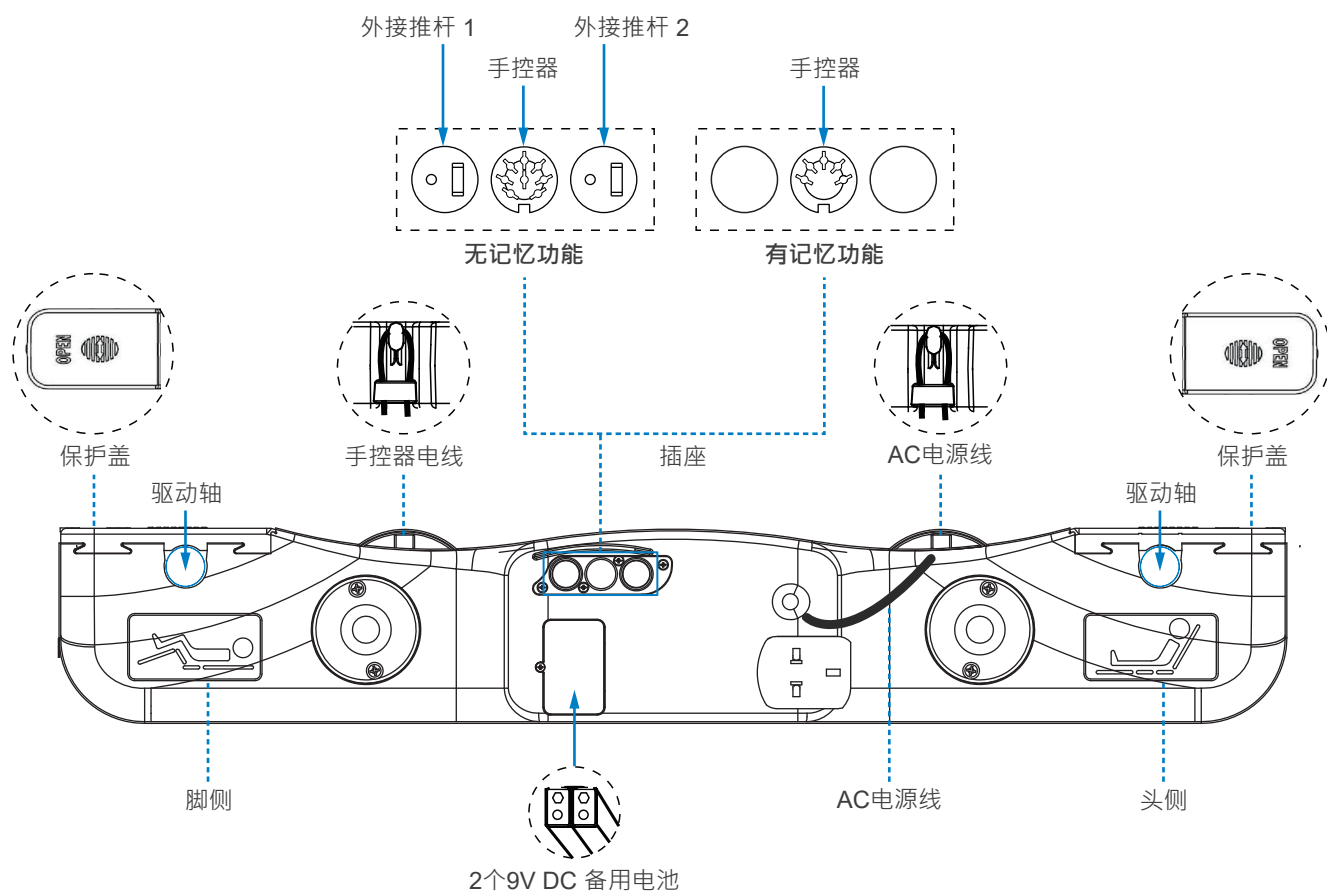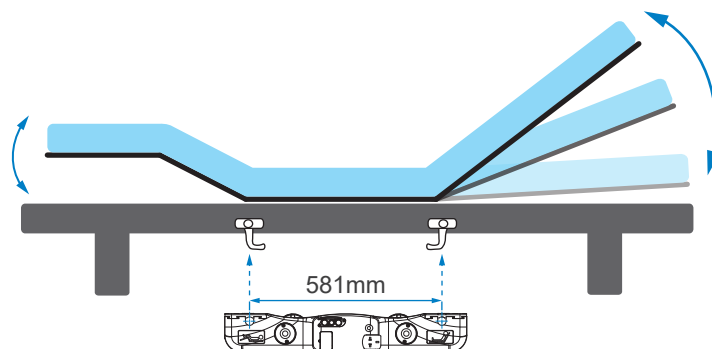

● 安装步骤

1. 在安装之前，请检查电源线是否未插入电源。
2. 将 2 个 9V DC 的备用电池放入电池盒里：先取下电池盒盖，将电池插入后再装回电池盒盖。
3. 将 AC 电源线和手控器电线缠绕在钩子上(如图所示)，以免在搬运过程中造成任何损坏。
4. 将手控器接头插入中间位置的专用插座
5. 将船型电机上的图形符号与床架相匹配：
“头侧”符号必须对应于链接到背板机构的轴。
“脚侧”符号必须对应于链接到脚踏板机构的轴。
6. 将船型电机安装到床架上之前，请先检查床架是否处于水平位置。
7. 拉出红色卡榫，然后沿着保护盖移动，以固定床架轴。



8. 确保侧面的位置处于重置位置，然后将电动机安装到床轴上。确保它们正确接合。
9. 合上保护盖，然后推回红色卡榫。请从步骤 5 重复安装另一侧。



10. 将外接推杆连接到专用插座(可选)。确保所有保护盖和零件已正确安装到位。
将电源线插入主电源，船型电机即可正常运行。


床架控制

1. 按着按键不放，控制的床板就继续移动，走到底会自动停止。
2. 过程中若松开按键，床板动作立刻停止。

按键及操作：

(以 HD 手控器为例)

- ① 推杆 #1 伸出
- ② 推杆 #1 缩回
- ③ 推杆 #2 伸出
- ④ 推杆 #2 缩回
- ⑤ 推杆 #3 伸出
- ⑥ 推杆 #4 缩回
- ⑦ 推杆 #3 伸出
- ⑧ 推杆 #4 缩回

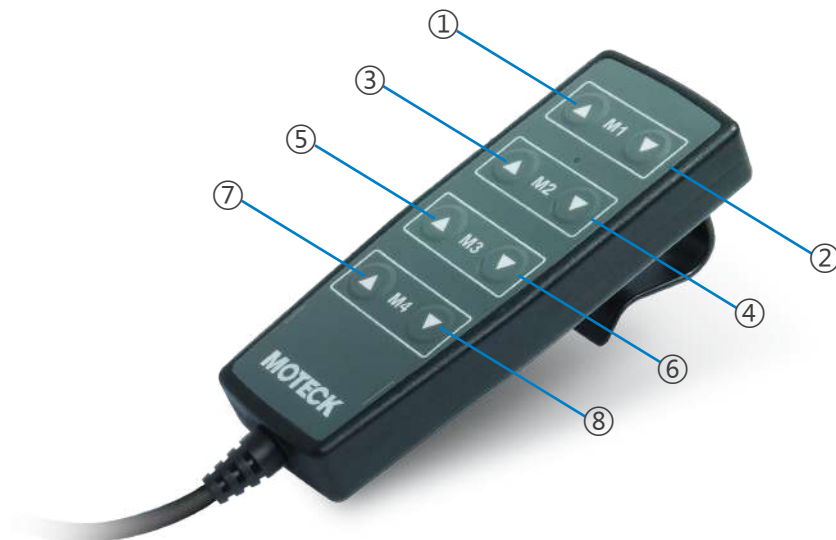

位置记忆

● 位置设定

1. 记忆位置键可以储存背部和腿部的位置。长按储存键 2 秒，LED 慢闪。再按记忆位置键储存位置，LED 指示灯闪烁表示已完成存储。
2. 存储位置只能被覆盖，不能被删除。

● 执行到位置

1. 长按记忆位置键自动走到床的存储位置，按任意按键停止。
2. 在运行期间 LED 指示灯闪烁，然后在床到达相应位置时恒亮。

按键及操作：

(以 HI 手控器为例)

- ① 储存
- ② 记忆位置 #1
- ③ 记忆位置 #2



备用电池功能

如遇停电，在电池室里装上 2 个 9V DC 电池，驱动收回推杆。



电池室

备注：

仅提供一次性使用，并且待机时间非常短。